

An
Fa. Söring

22.10.02

z. Hd. Herrn Schüller - Iwersen

Betreff: OP - Bericht über Mamma - Ablatio / St. Joseph - Stift Bremen!

Hallo Jan,

wie besprochen, möchte ich Dir mit Absprache von Herrn Link, einen kleinen Infobrief über die gelaufene OP übermitteln.

Anwender: OA Herr Dr. Parys / Gynäkologie St. Joseph - Stift Bremen
Die Chefin ist hier Frau Prof. Frantzen!

Ausgeführte OP war eine Mamma - Ablatio!

Der Hautschnitt wurde mit einem reinen Cut - Strom / 130 Watt ausgeführt.
Die Koagulationseinstellung war 55 Watt, die nur für die Blutstillung an der Haut
gebraucht wurden.

Für die gesamte Präparation der Brust / Fettgewebe wurde mit dem
kombinierten Blendstrom gearbeitet.

Einstellung: Blend 120 Watt / Untermenü = BL 8!

Für den o. g. Anwender war das Schnitt- u. Koagulationsergebnis so überzeugend,
das der Wechsel auf das forcierte Schneiden / Untermenü = Force 9 nicht mehr
gewünscht wurde.

Auch auf einen bipolaren Einsatz hat der Anwender verzichtet.

Die Vermutung ein sehr gutes Schneide - u. Koagulationspotenzial (sowohl im Cut,
als auch im Koag - Modus) zu haben, wurde hier eindeutig bestätigt!

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Kluck / Carsten Link / GS Norddeutschland